

Truse de nutritie enterala cu conectare la sticla

FLOCARE INFINITY BOTTLE SET

FLOCARE BOTTLE SET sunt truse de alimentatie pentru pompa de nutritie enterala NUTRICIA INFINITY, ce permit conectarea dintre pompele de nutritie enterala NUTRICIA INFINITY si oricare dintre flacoanele cu solutie de nutritie tip Nutrison. Prezinta un adaptor multi-compatibil pentru flacoanele din plastic. Doar pentru uz enteral.


Caracteristici:

- Prezinta caracteristici care le diferentiaza de sistemele de nutritie parenterala (culoare lila a tuburilor si a conectorilor).
- Conector patentat pentru flacoane care s-a dovedit ca minimalizeaza riscul contaminarii;
- Sistem de conectare tip “Connect-first-spike-later” ce permite o utilizare optima si confortabila;
- Contin protectie de tip “automatic free flow protection”;
- Port-ul pentru medicamente: port Y cu capac;
- Picurator;
- Clema de siguranta;
- Fabricat cu un material din plastic sigur pentru oameni si mediu (fara materiale din Latex si DEHP);
-

Recomandari:

- A se inlocui la fiecare 24 ore sau cand timpul maxim de folosire a solutiilor de nutritie enterala a expirat;
- Trebuie folosit capacul pentru a evita contactul dintre aer si solutia de nutritie.

Ambalaj: 1 set steril per blister; 30 seturi per carton

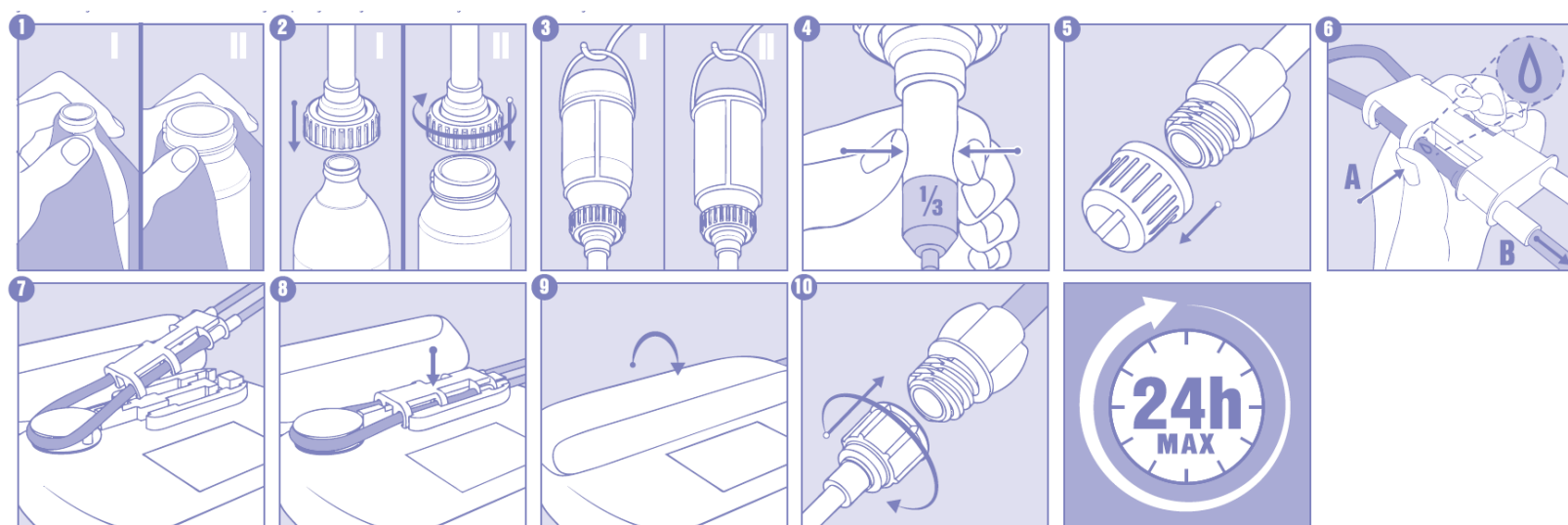

BLISTER TEXT: FLOCARE® INFINITY BOTTLE SET

Continut steril, daca pachetul nu este deschis sau avariat/Doar pentru uz enteral/A se folosi doar la un singur pacient/A se depozita intr-un loc curat si uscat/Contine parti detasabile ce pot fi periculoase pentru copiii mici/Fara DEHP/Fara latex.

Producator: Nutricia Medical Devices BV, Schiphol Blvd 261, 1118 BH Schiphol Airport, Olanda

Locul productiei: Nutricia Pharmaceutical Wuxi Co., Ltd., No.17 Xinming Road, Wuxi High-tech Development Zone, P.R.China

Importator: S.C. Nutrient Solutions SRL, Str. Sf. Treime nr.17, Bucuresti, 0727.737.646, comenzi@nutrient.ro.

CUTIE TEXT: FLOCARE® INFINITY BOTTLE SET X 30

Indicatorul trebuie sa fie verde.

Doar pentru uz enteral/ A se folosi doar la un singur pacient/ A se depozita intr-un loc curat si uscat / Fara DEHP/Fara latex.

Producator: Nutricia Medical Devices BV, Schiphol Blvd 261, 1118 BH Schiphol Airport, Olanda

Locul productiei: Nutricia Pharmaceutical Wuxi Co., Ltd., No.17 Xinming Road, Wuxi High-tech Development Zone, P.R.China

Importator: S.C. Nutrient Solutions SRL, Str. Sf. Treime nr.17, Bucuresti.